

菌斑显示液使用说明书

文件编号：NG-QT-PD-IN-CN-001/01-00

【产品名称】 菌斑显示液**【型号 / 规格】**

型 号：A 型 规 格：0.4ml、1ml、3ml、5ml、10ml、30ml、50ml

【主要成分】 主要成分由纯化水、赤藓红、丙三醇、食用香精组成。**【预期用途】** 用于显示菌斑、龋齿或定位根管口，以辅助口腔检查和治疗。**【适用范围】** 适用于口腔内牙菌斑的染色观察。**【产品性能】**

- 1、外观：紫色或紫红色液体。
- 2、PH 值：5.0-7.0。

【使用方法】

1. 彻底清洁牙齿表面。
2. 打开牙菌斑显示液瓶盖。
3. 使用合适的一次性涂药器（棉球、毛刷、探针等），将本品均匀涂于全部牙齿内外两侧，或将本品滴加在清水中，漱口一次。
4. 将口中残余物吐出，用清水漱口一次。
5. 对着镜子检查口腔，牙面被染色的部分即为牙菌斑附着部位。
6. 含漱后直接刷牙清洁效果显著，刷牙后可再检测一次是否已去除菌斑，固执菌斑建议到专业机构清洗牙齿。

【禁忌症、注意事项、警示及提示性说明】

- 1、使用前应仔细阅读说明书，在有效期内使用。
- 2、本品不可大量吞食。
- 3、对本品成分过敏者禁用。
- 4、孕妇忌用。
- 5、若不慎喷入眼内或伤口处，用清水清洗干净

【不良反应】 本产品未见不良反应**【有效期】** 3 年**【贮 藏】** 避免阳光直射，请保管在室温阴暗处。**【生产日期】** 见标签或包装盒**【执行标准】** 产品技术要求**【生产备案凭证编号】** 冀秦食药监械生产备 20190002 号**【医疗器械备案凭证编号】** 冀秦械备 20190003 号**【产品技术要求编号】** NG-QT-PD-PF-002/01-00**【备案人 / 生产企业名称】** 纳极口腔科技秦皇岛有限公司**【备案人 / 生产企业住所】**

秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号办公楼 205 室

【生产地址】 秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号**【售后服务单位】** 纳极口腔科技秦皇岛有限公司**【备案人 / 生产企业联系电话】** 0335-8903835**【邮 编】** 066004**【编制日期】** 2018 年 11 月 20 日

如有问题请与生产企业联系