

**【产品名称】**脱敏剂

**【产品型号】**A 型

**【产品规格】**0.4ml、1ml、3ml、5ml、10ml、30ml

**【产品性能】**1. 感官指标：无色透明液体 2. pH 值：3.0-6.0

**【产品成分】**

本品主要成分由 2- 羟乙基甲基丙烯酸酯、戊二醛、纯化水等组成。

**【适用范围】**

适用于缓解因牙本质暴露而引起的牙齿过敏症状。

**【使用方法】**

1. 清洁牙齿然后用水冲洗；
2. 用橡皮障保护口腔粘膜，保证脱敏剂只与需要的区域接触；
3. 使用棉球或刷子将最少量的脱敏剂涂抹在过敏症状的牙齿表面，然后保持 30-60 秒钟。用气枪轻吹牙齿表面，使液体薄膜消失，牙齿表面不再发亮，5 分钟后用水冲洗干净；
4. 使用后 30 分钟内勿进食或饮水，效果更加。
5. 如果一次治疗不能完全缓解疼痛或持续时间较短，可以在同一次就诊或下一次就诊时再做一次相同的治疗。

**【注意事项】**

1. 请勿吞食。
2. 若不慎喷入眼内或伤口处，请用清水清洗干净。
3. 室温干燥处保存。
4. 请将本品置于儿童不易触及的地方。
5. 本品由口腔专业医护人员或经过口腔专业医护人员培训的人员操作使用。

**【禁忌症】**

1. 溃疡性牙龈炎、口腔炎、支气管哮喘的患者禁用；
2. 在感冒发烧、肠胃不适期间不宜使用；
3. 对本品成分过敏者禁用；
4. 孕妇禁用；
5. 3 岁以下儿童不宜使用。

**【警示】**

在正常情况下使用不会发生不良反应，任何时候如果感觉不能忍受可以通过刷牙或漱口去除。

**【储存条件】**

包装完好产品应储存于室温干燥处。

**【运输条件】**

产品在运输、装卸时应小心轻放，避免撞击、剧烈运动、日晒雨淋。

**【生产许可证编号】** 冀食药监械生产许 20190057 号

**【医疗器械注册证编号】** 冀械注准 20192170281

**【产品技术要求编号】** 冀械注准 20192170281

**【注册人 / 生产企业 / 售后企业】** 纳极口腔科技秦皇岛有限公司

**【住所】** 秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号办公楼 205

**【生产地址】** 秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号二号厂房一楼

**【电话】** 0335-8903835

**【邮编】** 066004

**【生产日期】** 见标签或包装盒

**【使用期限】** 3 年

**【编制日期】** 2019 年 9 月 24 日